



HERSTELLER:.....

Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise **vor** dem erstmaligem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.

KONTROLLE DER LIEFERUNG

Der Toilettenstuhl wird Ihnen von uns in gebrauchsfähigem Zustand ausgehändigt, und Sie erhalten eine Einweisung in die Bedienung des Gerätes.



SICHERHEITSHINWEISE

- Der Gebrauch ist **nur auf ebenem und festem geradem Untergrund zulässig**.
- **Stets** den Toilettenrollstuhl **gegen Wegrollen sichern!** Auch bei Nichtgebrauch!
- Der Stuhl ist nur zur **Beförderung einer Person** zulässig.
- Der Stuhl ist **nur im Innenbereich zu verwenden**.
- Um eine absolute Standfestigkeit zu erreichen, stellen Sie die hinteren Bremsen fest.
- Sie können den Stuhl schieben, wenn Sie die hinteren Bremsen lösen.
- **Zu Ihrer Sicherheit setzen Sie sich auf der Sitzfläche weit nach hinten. – Kippgefahr!**
- **Nach-vorn-Beugen**, hinauslehnen sowie **extremes Neigen** des Oberkörpers vor-, seit- oder rückwärts, besonders beim Aufnehmen bzw. Ablegen von Gegenständen **vermeiden. – Kippgefahr!**
- **Vor dem Überwechseln** aus/in den Stuhl ist die **Beinstütze hochzuschwenken**. **Bremsen** Sie den Stuhl bei hochgeschwenkter Beinstütze **nicht mit den Füßen ab**. - Unfallgefahr durch Umknicken!
- Unkontrollierte **Rollbewegungen** beim Trippeln sind zu **verhindern!** – Unfallgefahr!
- **Nässe** oder **Feuchtigkeit** an Rollstuhl-/Stuhlteilen bedeuten **Rutschgefahr!**
- Schwenk- oder abnehmbare Armlehnen **nicht** zum Anheben oder Tragen des Stuhles verwenden. Den Toilettenrollstuhl **nicht** mit Insassen anheben oder tragen.
- Achten Sie darauf, daß der Patient nicht mit seinen Oberschenkeln unterhalb der erhöhten Armauflagen sitzt: **Verletzungsgefahr**, wenn Armauflagen nach unten eingeschoben werden.
- Wenn Sie die Armauflagen nach hinten abschwenken wollen, klappen Sie sie einfach nach hinten weg.
- Stellen Sie sich **nicht mit ganzem Gewicht auf die Fußplatten!** – Kippgefahr!
- Der Toilettenrollstuhl ist nur **mit Hilfe einer Begleitperson** zu benutzen.
- Der Toilettenrollstuhl ist vor **unbefugter Benutzung** (besonders durch Kinder) zu **sichern!**

FUSS-FESTSTELL-BREMSE

Feststellen

- Kipphebelfläche mit dem Fuß bis zum Anschlag niedertreten

Lösen

- Kipphebelfläche mit dem Fuß bis zum Anschlag nach vorne drücken.

Achtung!

Beim **Feststellen** nur **einer Bremse** rollt das freilaufende Rad um das gebremste Rad. - **Unfallgefahr!**

BEINSTÜTZEN

Hochschwenken

- Fuß-Feststellbremsen betätigen, (Hilfsperson). So vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Fortrollen des Toiletten-Rollstuhles.
- Beide Füße von der Beinstütze nehmen und die Beinstütze bis zum Anschlag hochschwenken.

Achtung!

Die hochgeschwenkte Beinstütze ist nicht verriegelt und kann beim Transport nach vorn umschwenken.

Bei Bedarf sichern!

Achtung!

Beim Belasten der Beinstütze kippt der Toiletten-Rollstuhl leicht nach vorn. Achten Sie auf den un-beschädigten Zustand der Gummipuffer!

Unfallgefahr bei defekten oder fehlenden Puffern!

BEINSTÜTZLÄNGE

Die Beinstützlänge ist durch eine stufenlos verstellbare Fußauflage einstellbar. Zum Einstellen der Beinstützlänge ist die Verschraubung je Seite zu lösen. Nach dem Einstellen, durch paralleles Verschieben zur Fahrbahn, Verschraubungen festdrehen.

ARMLEHNEN

Die Armlehnen sind schwenkbar.

Schwenken der Armlehne

Schwenken Sie die Armlehne bis zum Anschlag nach oben oder unten. (je nach Bauart)

Zurückschwenken der Armlehne

Schwenken Sie die Armlehne bis zum Anschlag in die Ausgangsposition.

Achtung!

Greifen Sie beim Schwenken der Armlehne **nicht in den Anschlagbereich!**

TOILETTENSITZ / -TOPF

Toilettentopf einschieben

Der Toilettentopf ist mit oder ohne Deckel von hinten, unter den Toilettensitz in die Führungsschiene zu schieben. Der Deckel kann zur Ablage in die Halterung geschoben werden.

Toilettensitz abnehmen

- Vordere Sitzkante nach oben aus der Klemmung ziehen.
- Toilettensitz nach oben abheben.

Toilettensitz auflegen

- Hintere Sitzkante mit den offenen Ecken zum Rücken schieben.
- Vordere abgerundete Sitzkante bis zum Anschlag nach unten drücken. – Sitz muß einrasten.
- Festen Sitz prüfen.

ÜBERWECHSELN AUS / IN DEN TOILETTEN-ROLLSTUHL

Während des Überwechselns, z. B. vom **Toiletten-Rollstuhl** ins Krankenbett, **entlasten** Sie den Toiletten-Rollstuhl.

Achtung!

- Führen Sie das **Überwechseln nur mit Hilfe einer Begleitperson und festgestellten Lenkrollen** aus. (**Unfallgefahr!**)
- Die Beinstütze befindet sich im Beinbereich, so daß **beim Überwechseln Stolpergefahr** besteht! Deshalb ist die **Beinstütze hochzuschwenken!**

WARTUNG UND PFLEGE

Wartung

Prüfen Sie vor der Benutzung alle Schraubverbindungen auf festen Sitz. Defekte Bauteile, wie Toilettensitz, Lenkräder, Gummipuffer, Rückengurt etc. sind sofort durch den auszuwechseln, wenden Sie sich hierzu umgehend an Ihren Fachbetrieb.

Pflege

Säubern Sie die Bezüge mit warmen Wasser oder verwenden Sie zusätzlich ein handelsübliches Feinwaschmittel. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel. Pflegen Sie die Kunststoffteile mit handelsüblichen Kunststoffreinigern.